


# サンプルのお取扱とご報告までの手順


## ① 同梱物の確認

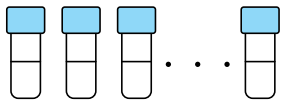

専用チューブ(サンプル容器)

- 必要本数
- 不活化試薬の漏れ
- 汚れ・破損

専用チューブは10~30℃で保管してください

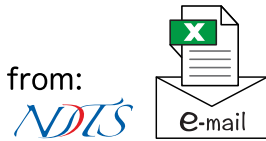


ご注文シートを保存

## ② サンプルの準備



側面にサンプル名を記入  
(通し番号も可)

記入

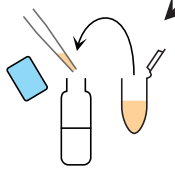


分離血清 300  $\mu$ l を  
専用チューブへ分注



ご注文シートを添付

メール返信

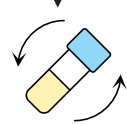


血清の一部をお手元に保管してください


転倒混和



印刷

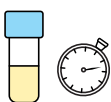

15分, 室温静置

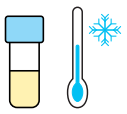


冷凍保存



ご注文シート

## ③ ご発送

- サンプル
- ご注文シート
- 冷凍便・午前着指定

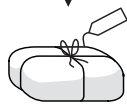

004-0015  
札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-6-8  
NDTs株式会社 宛  
電話番号: 011-376-0601

弊社に送付されたサンプルは返却できません

## ④ 結果のご報告

ご登録先にメールで結果をご報告

